

Alles Gute fürs Krankenhaus




MOBILISATIONS-SITZ

Unterstützungshilfe zur Frühmobilisierung

- » Sicherheit für den Patienten
- » Entlastung für die Pflege
- » Leitliniengerecht
- » Kosteneffizient

 **DAHLHAUSEN®**

MOBILISATIONS-SITZ

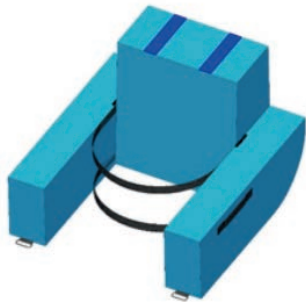

REF. 60.900.21.009 | Der Mobilisations-Sitz



Verstellbare Kopfstütze



Befestigung am Krankenbett

Der Mobilisations-Sitz dient als Unterstützungshilfe zur Frühmobilisierung von Patienten. Er wird auf ein vorhandenes Patientenbett befestigt und kann individuell an den Patienten angepasst werden. Zur einfacheren Handhabung sind die Armlehnen klappbar. Das mitgelieferte Zubehör kann für verschiedenste Krankenhausausstattungen angepasst werden.

AUFBAU

- + 1 Rückenlehne 550 x 500 x 300 mm,
 - + 2 Armlehnen 800 x 270 x 150 mm (drehbar)
 - + 1 Schwenkeinheit
 - + 1 Kopfstütze 380 x 300 x 300 mm (klappbar)
 - + 4 Gurtbefestigungen à 500 mm Länge
 - + Bauch- und Brustgurt
 - + Seitliche Schlaufen für den Transport
- + Maße: 800 x 550/ 270 x 800 mm
+ Gewicht: 13 kg

MATERIAL

Kombikern: 30 mm PE- Schaum, fest verklebt auf PU-Schaum mit integrierter Schwenkeinheit.

Hülle: PVC-Planenstoff mit Befestigung und Gurtverbindung

Auf der Rückenlehne sind 2 Flauschbandstreifen zur Befestigung einer Kopfstütze angebracht.

ANWENDUNG

1. Sitz auf dem Patientenbett positionieren. Armlehnen mit Hilfe der seitlichen Griffe nach unten klappen.
2. Korrekten Stand sicherstellen und den Sitz mit Hilfe der vorhandenen Ösen und den beiliegenden Gurthalterungen am Bettgestell befestigen.
3. Patient mit Bauch- und Brustgurt sicher stabilisieren.
4. Sollte die gewünschte Kopfstabilisierung noch nicht erreicht sein, so kann die Kopfstütze auf die Rückenlehne aufgebracht und je nach Körpergröße ausgerichtet werden.

DAHLHAUSEN®

P. J. Dahlhausen & Co. GmbH
Emil-Hoffmann-Straße 53
50996 Köln · Germany
Tel.: +49 (0) 22 36 39 13-0
Fax: +49 (0) 22 36 39 13-109
info@dahlhausen.de
www.dahlhausen.de